

HASZNÁLATI UTASÍTÁS



Saját tapasztalatomból kiindulva, arra az elhatározásra jutottam, hogy kedvenceinket úgy szolgáljuk ki, hogy az a legmagasabb színvonalon történjen, és mindezek mellett, ha módunk van rá, egészségük megóvásával és a gyógyító hatás kifejtésével tegyük lehetővé (például téli mosás, tisztántartás, szárítás).

Amióta beszereltük a lószárítót vagy nevezhetjük lószolinak is, mindenki számára lehetővé tettük a lovak szoliztatását, azóta látható eredménye van pszichésen és fizikailag egyaránt.

Amit tudni kell az általunk használt lószoliról:

Ezeket a sugárzókat a humán gyógyászatban és a professzionális infrasaunákban is használják, a különbség annyi, hogy a sugárzók mellé 3 db ventilátor van szerelve, amelyek mozgatják a levegőt a ló körül. Ez segíti elő a gyors száradást vagy megakadályozza azt az izzadást, amit egy humán szaunától elvárunk.

Az infracsövek, amely Philips gyártmányú, azt hiszem nem kell kételkedni, a gyártó által nyilvánosságra hozott tesztekben. A Philips cég ezeket a csöveket úgy ajánlja, hogy az élő szervezetre kifejtett hatását a véráramnak kell a vérplazmákon keresztül továbbítania. Ez dúsabb oxigénfelvételt eredményez.

A lovaknak kedve, frissessége szemmel láthatóan jobb.

A lovak beszoktatása:

Emeljük a készüléket a legmagasabb pontjára, először csak beindítás nélkül hagyjuk alatta pár percig a lovat. A magasságot tartva kapcsoljuk be a sugárzókat, majd néhány perc használat után fokozatosan 10 cm-t, majd újabb néhány perc után újabb 10 cm-rel engedjük lejjebb a készüléket.

Használat:

A lovak magasság különbsége miatt a több fokozatú állítás alsó helyzete ne legyen közelebb, mint 70 cm. A lovak tűrőképessége és szelídsége különböző, ezért a legkönnyebben úgy tudjuk megtapasztalni a hőmérsékletet, aminek függvénye a külsőhőmérséklet és a készülék alatti légmozgás, hogy fedetlen kezünket a ló hátára vagy marjára helyezzük, és pár percig otthagyjuk, meggyőződünk róla, hogy nem túl meleg.

A beállított idő (zsetonautomata vagy időkapcsoló) lejártá után vezessük ki a lovat a készülék alól.

Zsetonautomata beállítás:

A zsetonautomata belsejében elhelyezett beállítási útmutató szerint programozzuk be.

Műszaki adatok:

Méret	1050 x 2100 mm
Feszültség	230 V
Teljesítmény	3200 W

Oldalsugárzók:

Méret	900 x 200 mm
Feszültség	230 V
Teljesítmény	500 W

SZERELÉSI UTASÍTÁS

A lószárító infrátartó szerkezetre kell felszerelni. A tartó szerkezet hossziránti része 1700 mm, a keresztirányú rész hosszát a helyszínen lévő felszerelhetőségi lehetőségek határozzák meg.

Az elektromos emelő szerkezet rögzítését 40x40-es zártszelvény idomra szereljük fel úgy, hogy a szerkezet a ló fejénél legyen (az ábra szerint).

A 2 db drótkötél rövidebbik vége közvetlenül az emelő alatti rögzítő pántba csatlakozik. A hosszabbik vége csigán keresztül a másik oldalra csatlakozik.

A lószárító infra vízszint helyzetét a becsatlakozásnál lévő drótkötél rögzítő dióban lévő drótkötél feszítésével vagy lazításával állíthatja be.

Az elektromos csatlakozás a mennyezeten 2 aljzatban, az egyikbe az emelő szerkezet, a másikba pedig a lószárító infra csatlakozik.

FIGYELEM! FÖLDELT, 230 V-OS 4 KW-OS CSATLAKOZÁS SZÜKSÉGES!

